


BUDENAT® ACUTE D 441

Płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni

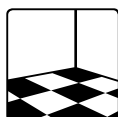

Zakres zastosowania

- Do dezynfekcji w przypadku epidemii
- Zgodny z IfSG*
- Odpowiedni do wszystkich odpornych na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych

Zalety / właściwości produktu

- Idealne rozwiązanie w przypadku epidemii
- Produkt ujęty na niemieckiej liście RKI*, obszar działania AB (bakterie i wirusy)
- Produkt ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), spory bakteryjne, wirusy z otoczką, wirusy bez otoczki (pełne działanie wirusobójcze, w tym adeno-, polio-, parwo-, polyoma-, norowirusy)
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN13704, EN14348

Dane techniczne	
Wartość pH	3,5 - 4
Kolor produktu	niebieski
Pojemność	1 l butelka



BUDENAT® ACUTE D 441

Płynny koncentrat do dezynfekcji nawierzchni

Sposób użycia i dozowanie

Nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu. Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie kontaktu. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z skórą spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe	Stężenie	Czas kontaktu
Bakterie i drożdże	2,0 %	15 min.
Prątki gruźlicy (TBC)	4,0 %	60 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć
Spory bakteryjne (Clostridium difficile)	2,0 %	30 min.; powierzchnię należy wstępnie umyć
Vaccinia (wirus krowianki)	0,25 %	5 min.
HBV / HIV	0,5 %	5 min.
Adenowirusy	1,0 %	30 min.
Papowa- / Poliomawirusy	1,0 %	60 min.
Poliowirusy	2,0 %	60 min.
Parwowirusy	2,0 %	120 min.
Norowirusy	1,0 %	60 min.
	2,0 %	30 min.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specjalnych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków prosimy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Ważne wskazówki

Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.

100 g zawiera: 3,5 g formaldehydu, 9,6 g gliksalu, 2,5 g glutaralu, 8,0g chlorku didecyldimetyloamoni.

Numer pozwolenia 6452/15



Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 °C – 25 °C



BUDENAT® ACUTE D 441

Płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni

Zwroty określające rodzaj zagrożenia

H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H302+H332	Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334	Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350	Może powodować raka.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IfSG

Infektionsschutzgesetz (Ustawa o zapobieganiu zakażeń)

Niemiecki odpowiednik polskiej USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawierający m. i. obowiązek stosowania w przypadku wybuchu epidemii wyłącznie środków i metod ujętych na liście RKI.

IHO

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)

Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

RKI

Robert-Koch-Institut (Instytut im. Roberta Kocha)

Państwowy urząd ds. zdrowia w Niemczech. Wydaje m. i. listę przetestowanych środków i metod, których należy obowiązkowo używać w przypadku wybuchu epidemii wywołanych przez bakterie (obszar działania A), wirusy (ob. dz. B), spory wąglika (ob. dz. C) i spory tężca lub gorzeli gazowej (ob. dz. D).

VAH

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

Numer artykułu:

D441-0001

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 11.02.2016

BUZIL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl